

SHARPSITE® AC, AC X AUTOCLAVABLE ENDOSCOPES FROM 68E3989E & 68E3999 E

Formål	Produktet er ikke sterilt ved levering og skal rengøres og steriliseres inden hver brug, inklusive første gang.	
Emballage/transport	Se Opbevaring	
Rengøring: Maskinvask (Der må IKKE anvendes ultralyds-vaskemaskine)	<p>Fjern instrumenter og udstyr fra eventuelle steriliseringsbakker, inden de anbringes i maskinens kurve. Vend udstyret i henhold til kravene fra opvaske-/desinfektions-maskinens fabrikant.</p> <p>Brug et rensmiddel med basisk eller neutral pH-værdi som anbefalet af opvaske-/desinfektionsmaskinens eller rensmidlets fabrikant.</p> <p>Produkterne er blevet valideret for effektiv rengøring ved en cyklus i en automatisk opvaske-/desinfektionsmaskine, som minimum varer 44 minutter, inklusive en forvask, hovedvask og skylning samt varm skylning. Den varme skylning skal vare mindst 10 minutter og have en minimumtemperatur på 60°C.</p>	
Rengøring: Manuel	<p>Læg instrumentet i blød i et mildt enzymrensemiddel klargjort ifølge fabrikantens anbefalinger (dvs. Klenzyme) i min. 2 minutter.</p> <p>Skyl med rensed vand.</p> <p>Læg instrumentet i blød i et mildt rensmiddel klargjort ifølge fabrikantens anbefalinger (dvs. Manu-Klenz) og rengør med en blød børste og en ikke-slibende klud, og hold samtidig øje med sprækker og andre områder, der er vanskelige at rengøre, indtil alt synligt snavs er fjernet.</p> <p>Skylles grundigt af med rensed vand og tørres af med en ren, blød klud.</p>	
Sterilisering (Krav om minimumtemperatur og minimumsvarighed)	Desinficering med kold iblødsætning	
	Klargør iblødsætningsopløsningen. Brug CIDEXPLUS®, en 3,4% glutaraldehydopløsning.	
	Sænk endoskopet og dets dele helt ned i den desinficerende rensesvæske. Sørg for, at væsken kommer i kontakt med alle flader, herunder kanaler og hulrum. Sørg for at der ikke er luftbobler inde i endoskopet eller dets dele.	
	Lad endoskopet og dets dele ligge i blød i mindst 20 minutter.	
	Efter iblødsætningen skylles endoskopet og dets dele grundigt i rindende vand eller sterilt vand afhængigt af brugen.	
	Anbring endoskopet og dets dele på en ren, tør overflade.	
	Tør endoskopet grundigt, så der er klar til næste brug. Sørg for at der ikke er snavs på linerne.	
Fjern det beskyttende plasticskaf fra spiralkraven og placer endoskopet i en egnet steriliseringsbeholder. Anvend KUN disse parametre:		
Cyklus:	PreVac	Tryk
Temperatur:	132°C - 135°C	132°C - 135°C
Varighed:	4 min.	15 min.
<i>Ingen tørrecyklus</i>		
STERRAD 50, 100S, 200 -kompatibel		
STERIS SYSTEM 1-kompatibel		
100% EtO-steriliseringparametre:		
Forbehandling		
Temperatur:	57,2 +/- 2°C	
Relativ luftfugtighed:	70 +/- 5%	
Forbehandlingens varighed:	60 min.	
Parametre		
Temperatur:	54 +/- 2°C	
Ethylenoxidkoncentration:	600 +/- 25 mg/l	
Relativ luftfugtighed:	70 +/- 5%	
Gaseksponeringstid (fuld cyklus):	120 minutter	
Luftningsparametre:	57,2 +/- 2°C i 12 timer	
Opbevaring	Endoskopet skal opbevares i emballagebeholderen med det beskyttende plasticskaf eller i beskyttende bakker, som kan anskaffes i almindelig handel.	

Bemærk: Vejledningen ovenfor er blevet valideret af fabrikanten som værende I STAND TIL at klargøre produktet til genanvendelse. Det forbliver sterilcentralens ansvar at sikre, at genforarbejdningen, som den udføres ved brug af udstyr, materialer og personale, opnår det ønskede resultat. Dette kræver normalt, at processen valideres og overvåges rutinemæssigt.